

ODIC

『不思議な使用感』

をお試ください。

金属床に最適！

- 不思議その1 中速回転で軽く当てるだけで傷が消える。
- 不思議その2 放熱性に優れていて連続研磨が可能。
- 不思議その3 均一でなめらかな研磨面に仕上がる。

不思議な使用感のポイントは回転数

回転数を中速以下の**7000rpm~12000rpm**でご使用いただくのが秘訣です!!
通常では、遅いと思われる回転数ですが、不思議と傷が効率よく消えます。
また、回転数が遅い分だけ研磨時の発熱量が少なく、連続研磨も可能です。
『不思議な使用感』を感じていただける最適な回転数をぜひ、見つけ出してください。



7000rpm~12000rpm
の中から最適な回転数を見つけてください。

クレバーホイール

貴金属・コバルト系中研磨用ホイール

お手軽な50枚入 ¥3,100
お得な300枚入 ¥16,500

※表記の金額は標準価格(税別)です。

なんと“1枚55円”

(300枚入の場合)



■使用方法：通法に従いマンドレルに取付けた後、歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着して回転17,000rpm以下でご使用ください。■使用上の注意：使用前にハンドピースメーカーの指示に従いマンドレルの軸を確実に奥まで挿入してチェックがしっかり噛んでいることを必ず確認すること。使用前に予備回転を行い振れが無いことを確認すること。本品を使用する際は目の損傷を防ぐために保護用眼鏡等の防具を着用すること。局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し粉塵を吸入しないこと。本品は添付文書に記載の用途以外に使用しないこと。本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。■重要な基本的注意：損傷、変形のあるものは、絶対に使用しないこと。17,000rpm以下の使用回転数を厳守すること。無理な角度、過度の加圧状態で使用しないこと。回転中は、身体や衣服にふれないよう注意すること。■用途：貴金属・コバルトクロム系の中研磨用■外形：直径φ25mm 厚さ3mm■歯科用ゴム製研磨材(一般医療機器)■届出番号27B3X00046000014 ■サンプル品ロット番号0309A ■添付文書が必要な方はご請求ください。

お取扱店

オーディック株式会社

〒553-0003

大阪市福島区福島7-14-20

TEL: 06-6451-7385 FAX: 06-6451-7365

受付時間: am9:00~pm5:00(土・日・祝日は休業)

URL: <http://www.odic-go.com/>