

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用金属材料 70796000

アイコバルトMB260

【禁忌・禁止】

本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

成分・分量：

成分	分量
コバルト	62.0 %
クロム	28.0 %
モリブデン	4.0 %
ガリウム	3.0 %
その他*	3.0 %

※ 鉄、シリコン、マンガン

【使用目的、効能又は効果】

歯科メタルセラミック修復に用いる。

【品目仕様等】

該当規格：JIS T 6121「歯科メタルセラミック修復用金属材料」

物理的性質：

項目	仕様値	参考値 (自社データに基づく値)
液相点	1375±25 °C	1375 °C
固相点	1330±25 °C	1330 °C
ヤング率	—	180 GPa
耐力	250 MPa 以上	440 MPa
伸び	3 % 以上	10 %
熱膨張係数 (50～500°C)	14.7±0.5×10 ⁻⁶ K ⁻¹	14.7×10 ⁻⁶ K ⁻¹
密度	—	8.3 g/cm ³

【操作方法又は使用方法等】

- ワックスアップ・埋没・焼却
 - ワックスアップは通法によって行い、直径 2.5～3.0mm のサブスブルー、直径 5mm のランナーバーを使用してください。細い場合、湯まわり不良や錆染が発生する原因となります。
 - 埋没材は、高膨張型リン酸塩系等の高溶合金用埋没材を使用してください。
床用リン酸塩系埋没材の多くは膨張不足のため、不適合の原因となります。
 - 焼却は、埋没材の取扱説明書等に従って焼却してください。
- 溶解鑄造

溶解は、高周波加熱、アルゴン-アーク加熱、電気抵抗加熱、プロパンガス-酸素炎加熱等を使用してください。プロパンガス-酸素炎による溶解の際、長時間加熱しますと合金の酸化が進み、脆弱な鑄造体になりますので、すばやく作業してください。
高周波加熱による溶解の場合、金属が一塊になり、表面の酸化膜が割れてそれらが完全に散って一呼吸の後、鑄造してください。
鑄型温度は 850～950°C で、鑄込み温度は液相点より約 100°C 高くしてください。るつぽは、セラミックるつぽを使用してください。炭素るつぽは合金を脆くするので使用しないでください。他の合金用るつぽと併用しないでください。
- メタル調整・洗浄

表面の埋没材をサンドブラストで除去処理し、次に約 50 μm～150 μm のアルミナでサンドブラスト (2-2.5 気圧) 処理後、蒸留水またはアルコールで洗浄してください。
- ディギャッシング

ディギャッシングはしないでください。厚い酸化膜を生成し、陶材破折の原因になります。
- 陶材の築盛・焼成

本合金の熱膨張係数 (14.7×10⁻⁶ K⁻¹) より 0.5-3.0×10⁻⁶ K⁻¹ の小さい陶材を使用し、陶材の取扱説明書等に従って焼付けてください。

- ろう付

前ろうには、弊社製品「アイクロームソルダー」が使用できます。
- 本合金を再使用した場合や、本合金以外の合金が混入した場合には、物理的性質が低下することがあります。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ってください。
- るつぽは、他の合金用るつぽを併用しないでください。

【使用上の注意】

- 使用注意
 - 本合金の鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて、密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。また保護めがねを着用すること。
 - 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。また保護めがねを着用すること。
 - 他の合金と混溶しないこと。
 - 本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
 - 本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - 患者とのインフォームドコンセントの原則に基づいた治療をお勧めします。
- 重要な基本的注意
 - 本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 不具合・有害事象

有害事象
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量：100g/包、500g/包、1kg/包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元

株式会社アイディエス

住所：〒564-0053
大阪府吹田市江の木町 30-34

電話番号：06-6378-7711
FAX 番号：06-6378-7712

【問い合わせ先】

本社

住所：〒113-0033
東京都文京区本郷 3-5-4 朝日中山ビル 7F
電話番号：03-5840-9877
FAX 番号：03-5840-9866

大阪営業所

住所：〒564-0053
大阪府吹田市江の木町 30-34
電話番号：06-6378-7711
FAX 番号：06-6378-7712