

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用金属材料 70796000

アイクロームMB

【禁忌・禁止】

本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

成分・分量:

成分	分量
コバルト	60.6%
クロム	24.7%
モリブデン	6.5%
タングステン	5.0%
その他*	3.2%

※ シリコン、炭化クロム、鉄、マンガン

【使用目的、効能又は効果】

歯科メタルセラミック修復に用いる。

【品目仕様等】

該当規格: JIS T 6121「歯科メタルセラミック修復用金属材料」

物理的性質:

液相点	1410°C
固相点	1335°C
ヤング率	200GPa
耐力	505MPa
伸び	6.0%
熱膨張係数(50~500°C)	$14.3 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$
密度	8.5g/cm ³

【操作方法又は使用方法等】

(1) ワックスアップ・埋没・焼却

- ① ワックスアップは通法によって行い、直径3.0~4.0mmのスプルー線を使用してください。細かい場合、鑄込み不足や鑄巣発生の原因となります。
- ② 埋没材は、高膨張型リン酸塩系埋没材を使用してください。床用リン酸塩系埋没材の多くは膨張不足のため、不適合の原因になります。
- ③ 焼却は、埋没材の取扱説明書等に従って焼却してください。

(2) 溶解鑄造

溶解は、高周波加熱、アルゴン-アーク加熱、電気抵抗加熱、プロパンガス-酸素炎加熱等を使用してください。プロパンガス-酸素炎による溶解の際、長時間加熱しますと合金の酸化が進み、脆弱な鑄造体になりますので、すばやく作業してください。高周波加熱による溶解の場合、金属が一塊になり、表面の酸化膜が割れてそれらが完全に散って一呼吸の後、鑄造してください。鑄型温度は850~950°Cで、鑄込み温度は液相点より約100°C高くしてください。るつぼは、セラミックるつぼを使用してください。炭素るつぼは合金を脆くするので使用しないでください。他の合金用るつぼと併用しないでください。

(3) メタル調整・洗浄

表面の埋没材をサンドブラストで除去処理し、次に約50μmのアルミナでサンドブラスト(2-2.5気圧)処理後、蒸留水またはアルコールで洗浄してください。

(4) ディギャッシング

ディギャッシングはしないでください。厚い酸化膜を生成し、陶材破折の原因になります。

(5) 陶材の築盛・焼成

本合金の熱膨張係数に近い陶材を使用してください。

(6) ろう付

前ろう付には、弊社製品「アイクロームソルダー」が使用できます。

(7) 本合金を再使用した場合や、本合金以外の合金が混入した場合には、物理的性質が低下することがあります。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ってください。
- (2) るつぼは、他の合金のるつぼを併用しないでください。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ① 本合金の鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。また保護めがねを着用すること。
- ② 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。また保護めがねを着用すること。
- ③ 他の合金と混濁しないこと。
- ④ 本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤ 本合金は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ⑥ 患者とのインフォームドコンセントの原則に基づいた治療をお勧めします。

(2) 重要な基本的注意

- ① 本合金の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

(3) 不具合・有害事象

有害事象
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量: 100g/包、500g/包、1kg/包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元

株式会社アイディエス

住所: 〒564-0053

大阪府吹田市江の木町30-34

電話番号: 06-6378-7711

FAX番号: 06-6378-7712

【問い合わせ先】

本社

住所: 〒113-0033

東京都文京区本郷3-5-4 朝日中山ビル7F

電話番号: 03-5840-9877

FAX番号: 03-5840-9866

大阪営業所

住所: 〒564-0053

大阪府吹田市江の木町30-34

電話番号: 06-6378-7711

FAX番号: 06-6378-7712